

## **IFU-004 INSTRUÇÕES DE USO**

### **PARABÉNS !**

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

### **PRODUTO:**

**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelos comerciais:** Implante UN II Cilíndrico HI  
Implante UN II Cilíndrico HE  
Implante UN II Cônico HI  
Implante UN II Cônico HE  
Implante UN II Cone Morse

### **ATENÇÃO !!!**

Produto de Uso Único. Proibido reprocessar.

Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada.

Produto Estéril. Não reesterilizar. Esterilizado por radiação gama.

Fabricante recomenda o uso único.

### **Fabricante:**

**IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA.**

Rua Vicente de Carvalho, 178-182 – Cambuci

CEP 01521-020 – São Paulo – SP - Brasil

Fone: (11) 3341-4083 Fax: (11) 3341-4083

CNPJ: 05.741.680/0001-18

Email: [Implacil@implacil.com.br](mailto:Implacil@implacil.com.br)

Responsável Técnico: Nilton De Bortoli Jr – CRO:32.160

**Registro ANVISA nº: 80259860032**

### **ATENÇÃO**

Para maior segurança:

- a) Leia atentamente todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de utilizar este produto.
- b) Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual.

Este Manual foi redigido originalmente no idioma português.

Data da Revisão: 16/01/2018

## **CONTEÚDO:**

### **1 – Descrição detalhada do produto**

- 1.1 – Modelo comercial: Implante UN II Cilíndrico HI
  - 1.1.1 – Nome e modelo
  - 1.1.2 – Descrição do produto
  - 1.1.3 – Especificações e características técnicas
- 1.2 – Modelo Comercial: Implante UN II Cilíndrico HE
  - 1.2.1 – Nome e modelo
  - 1.2.2 – Descrição do produto
  - 1.2.3 – Especificações e características técnicas
- 1.3 – Modelo Comercial: Implante UN II Cônico HI
  - 1.3.1 – Nome e modelo
  - 1.3.2 – Descrição do produto
  - 1.3.3 – Especificações e características técnicas
- 1.4 – Modelo Comercial: Implante UN II Cônico HE
  - 1.4.1 – Nome e modelo
  - 1.4.2 – Descrição do produto
  - 1.4.3 – Especificações e características técnicas
- 1.5 – Modelo Comercial: Implante UN II Cone Morse
  - 1.5.1 – Nome e modelo
  - 1.5.2 – Descrição do produto
  - 1.5.3 – Especificações e características técnicas
- 1.6 – Princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação
- 1.7 – Partes e Acessórios acompanhantes
- 1.8 – Opcionais, Materiais de Consumo e Materiais de Apoio
- 1.9 – Simbologia

### **2 - Instruções para uso do produto**

### **3 - Condições especiais de transporte, armazenamento, acondicionamento do produto**

### **4 - Advertências e/ou precauções a serem adotadas**

### **5 – Desempenho sobre requisitos essenciais de segurança, eficácia do produto médico e eventuais efeitos secundários indesejáveis**

- 5.1 – Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto
- 5.2 – Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações
- 5.3 – Segurança e eficácia do produto

### **6 – Instalação ou conexão à outros produtos**

### **7 – Preocupações em caso de descarte do produto**

### **8 – Termo de Garantia**

### **9 – Termo de responsabilidade**


## 1.1 – Modelo Comercial: Implante UN II Cilíndrico HI

### 1.1.1 - Nome e modelo

**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelo Comercial:** Implante UN II Cilíndrico HI

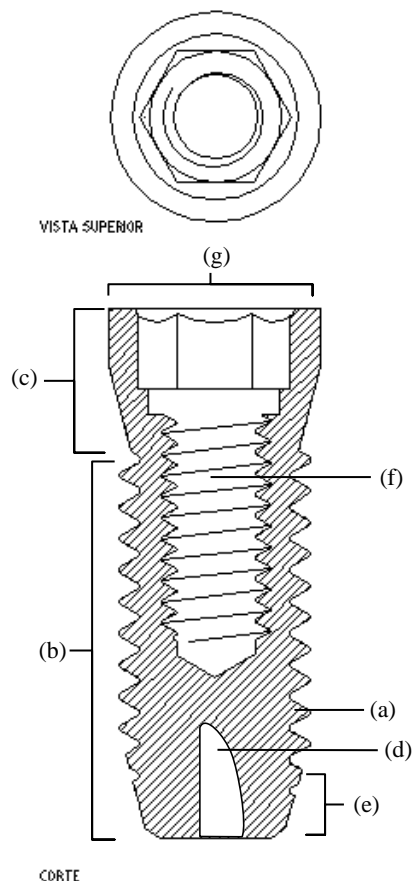

Legendas: 1) Implante montado. 2) Tapa Implantado.  
3) Montador. 4) Parafuso do montador. 5) Implante

### 1.1.2 – Descrição do Produto:

O IMPLANTE UN II Cilíndrico HI é constituído de corpo cilíndrico com rosca (a) que auxiliam sua instalação e ancoragem no leito ósseo em todo o seu comprimento. O corpo do implante (b) é tratado mecanicamente (jateamento), processo que aumenta a sua superfície de contato e facilita a ancoragem aumentando a superfície de osseointegração, mantendo somente na região do pescoço (c) um acabamento de baixa rugosidade do titânio para melhorar a sua aderência ao tecido ósseo. O implante possui três fresadas no ápice (d), distribuídas de maneira uniforme (120°) de modo a facilitar a sua inserção. Sua plataforma de assentamento (g) possui os seguintes diâmetros: 3,50mm que corresponde ao implante de 3,30mm; 4,00mm que corresponde ao implante de 3,75mm e 4,30mm; 5,00mm que corresponde ao implante de 4,75mm. É produzido com pescoço pouco divergente e ápice cônico auto-rosqueante (e). A conexão interna hexagonal faz desse sistema um dos mais simples de se manipular. No eixo longitudinal da parte superior do implante existe uma rosca central (f) que permite a fixação do componente protético por um parafuso. É produzido a partir do torneamento de barras de titânio comercialmente puro, atendendo a norma ASTM F-67; e ASTM F136.

### 1.1.3 Especificações e Características Técnicas:

O IMPLANTE UN II Cilíndrico HI vem acondicionado dentro de uma cápsula que é inserida dentro de um blister selado com Tyvek. O blister é colocado dentro de uma caixa de papel acartonado. É oferecido nos diâmetros 3,30mm; 3,75mm; 4,30mm e 4,75mm; e nos comprimentos 7,3mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm.

## 1.2 – Modelo Comercial : Implante UN II Cilíndrico HE

### 1.2.1 - Nome e modelo


**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelo comercial:** Implante UN II Cilíndrico HE



Legendas: 1) Implante montado. 2) Tapa Implante. 3) Montador. 4) Parafuso do montador. 5) Implante

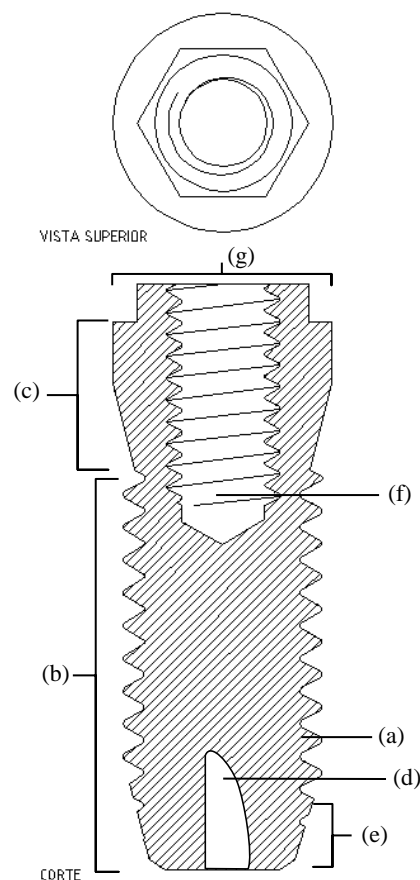

### 1.2.2 – Descrição do Produto:

O IMPLANTE UN II Cilíndrico HE é constituído de corpo cilíndrico com rosca (a) que auxiliam sua instalação e ancoragem no leito ósseo em todo o seu comprimento. O corpo do implante (b) é tratado mecanicamente (jateamento), processo que aumenta a sua superfície de contato e facilita a ancoragem aumentando a superfície de osseointegração, mantendo somente na região do pescoço (c) um acabamento de baixa rugosidade do titânio para melhorar a sua aderência ao tecido ósseo. O implante possui três fresadas no ápice (d), distribuídas de maneira uniforme (120°) de modo a facilitar a sua inserção. Sua plataforma de assentamento (g) possui os seguintes diâmetros: 3,50mm que corresponde ao implante de 3,30mm; 4,00mm que corresponde ao implante de 3,75mm e 4,30mm; 5,00mm que corresponde ao implante de 4,75mm. É produzido com pescoço pouco divergente e ápice cônico auto-rosqueante (e). A conexão externa hexagonal é um encaixe protético consagrado, usado no mundo todo a mais de 40 anos. No eixo longitudinal da parte superior do implante existe uma rosca central (f) que permite a fixação do componente protético por um parafuso. É produzido a partir do torneamento de barras de titânio comercialmente puro, atendendo a norma ASTM F-67; e ASTM F136.

O IMPLANTE UN II Cilíndrico HE possui o encaixe protético que mantém a liderança na escolha dos profissionais do mundo todo há décadas. O seu pescoço (c), ou counter-sink, se adapta bem na cortical óssea, distribuindo de maneira eficiente a carga oclusal.

### 1.2.3 Especificações e Características Técnicas:

O IMPLANTE UN II Cilíndrico HE vem acondicionado dentro de uma cápsula que é inserida dentro de um blister selado com Tyvek. O blister é colocado dentro de uma caixa de papel acartonado. É oferecido nos diâmetros 3,30mm; 3,75mm; 4,0mm e 4,75mm; e nos comprimentos 8mm, 10mm, 11,5mm, 13mm, 15mm e 18mm.

### 1.3 – Modelo Comercial: Implante UN II Cônico HI

#### 1.3.1 - Nome e modelo


**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelo comercial:** Implante UN II Cônico HI



Legendas: 1) Implante montado. 2) Tapa Implante.  
3) Montador. 4) Parafuso do montador. 5) Implante

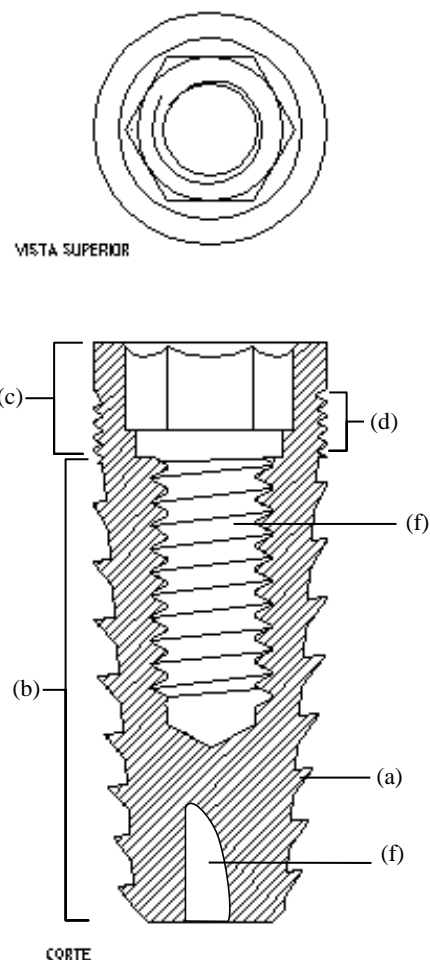

#### 1.3.2 – Descrição do Produto:

O IMPLANTE UN II Cônico HI é constituído de corpo em formato cônico com roscas (a) em todo seu comprimento que auxiliam sua instalação e ancoragem no leito ósseo. O corpo do implante (b) é tratado mecanicamente (jateamento), processo que aumenta a sua superfície de contato e facilita a ancoragem aumentando a superfície de osseointegração, mantendo somente na região do pescoço (c) um acabamento de baixa rugosidade do titânio para melhorar a sua aderência ao tecido ósseo. Na parte superior, este implante possui micro-espiras (d), que melhoram a distribuição na cortical óssea. O implante possui ainda três fresadas no ápice (e), distribuídas de maneira uniforme (120°) de modo a facilitar a sua inserção. É produzido com pescoço pouco divergente. A conexão interna hexagonal faz desse sistema um dos mais simples de se manipular. No eixo longitudinal da parte superior do implante existe uma rosca central (f) que permite a fixação do componente protético por um parafuso. O design deste implante favorece a distribuição de carga, sendo indicado principalmente para utilização em osso de baixa densidade ou mesmo para carga imediata. É produzido a partir do torneamento de barras de titânio comercialmente puro, atendendo as normas ASTM F-67; e ASTM F136.

#### 1.3.3 Especificações e Características Técnicas:

O IMPLANTE UN II Cônico HI vem acondicionado dentro de uma cápsula que é inserida dentro de um blister selado com Tyvek. O blister é colocado dentro de uma caixa de papel acartonado. É oferecido nos diâmetros 3,50mm; 4,00mm e 5,0mm; e nos comprimentos 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm.

## 1.4 – Implante UN II Cônico HE

### 1.4.1 - Nome e modelo


**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelo comercial:** Implante UN II Cônico HE



Legendas: 1) Implante montado. 2) Tapa Implante. 3) Montador. 4) Parafuso do montador. 5) Implante

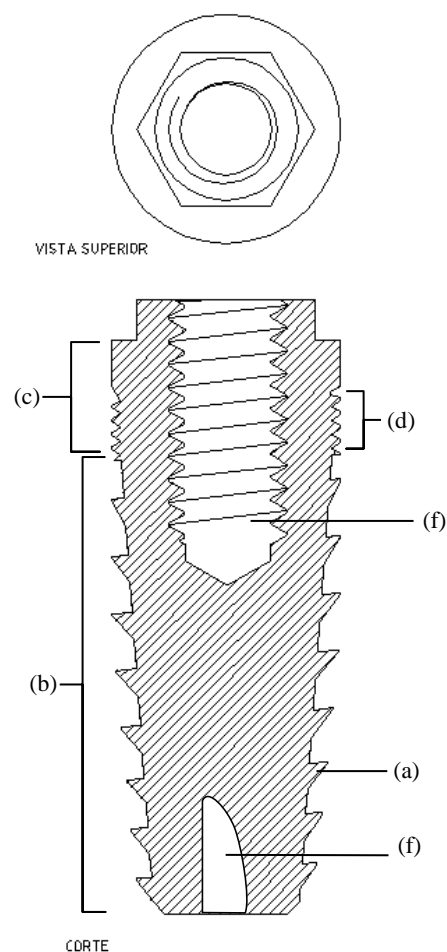

### 1.4.2 – Descrição do Produto:

O IMPLANTE UN II Cônico HE – Hexágono Externo - é constituído de corpo em formato cônico com roscas (a) em todo o seu comprimento que auxiliam sua instalação e ancoragem no leito ósseo. O corpo do implante (b) é tratado mecanicamente (jateamento), processo que aumenta a sua superfície de contato e facilita a ancoragem aumentando a superfície de osseointegração, mantendo somente na região do pescoço (c) um acabamento de baixa rugosidade do titânio para melhorar a sua aderência ao tecido ósseo. Ainda na parte superior, este implante possui micro-espiras (d), que melhoram a distribuição na cortical óssea. O implante possui ainda três fresadas no ápice (e), distribuídas de maneira uniforme (120°) de modo a facilitar a sua inserção. É produzido com pescoço pouco divergente. A conexão externa hexagonal é um encaixe protético consagrado, usado no mundo todo a mais de 40 anos. No eixo longitudinal da parte superior do implante existe uma rosca central (f) que permite a fixação do componente protético por um parafuso. O design deste implante favorece a distribuição de carga, sendo indicado principalmente para utilização em osso de baixa densidade ou mesmo para carga imediata. É produzido a partir do torneamento de barras de titânio comercialmente puro, atendendo as normas ASTM F-67; e ASTM F136. É oferecido nos diâmetros 3,50mm; 4,00mm e 5,0mm; e nos comprimentos 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm. Pode ser oferecido com montador. O IMPLANTE UN II Cônico HE combina a eficiência do encaixe protético hexagonal externo, consagrado mundialmente, com a praticidade proporcionada pelo design cônico.

### 1.4.3 Especificações e Características Técnicas:

O IMPLANTE UN II Cônico HE vem acondicionado dentro de uma cápsula que é inserida dentro de um blister selado com Tyvek. O blister é colocado dentro de uma caixa de papel acartonado. É oferecido nos diâmetros 3,50mm; 4,00mm e 5,0mm; e nos comprimentos 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm.



## 1.5 – Implante UN II Cone Morse

### 1.5.1 - Nome e modelo


**Nome técnico:** Implantes Dentários (Osseointegrável)

**Nome comercial:** Implante Universal II

**Modelo comercial:** Implante UN II Cone Morse



Legendas: 1) Implante montado. 2) Tapa Implante. 3) Montador. 4) Parafuso do montador. 5) Implante

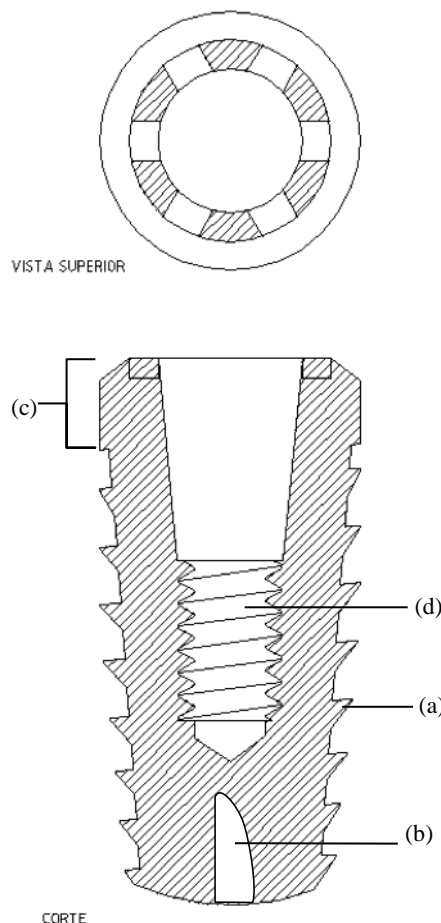

### 1.5.2 – Descrição do Produto:

O IMPLANTE UN II CONE MORSE é constituído de corpo em formato cônico com roscas (a) que auxiliam sua instalação e ancoragem no leito ósseo em todo o seu comprimento. O corpo do implante é tratado mecanicamente (jateamento), processo que aumenta a sua superfície de contato e facilita a ancoragem aumentando a superfície de osseointegração. Este tratamento de superfície é feito em todo o implante, uma vez que este é indicado para instalação de 1 a 2mm abaixo da crista óssea. O implante possui ainda três fresadas no ápice (b), distribuídas de maneira uniforme (120º) de modo a facilitar a sua inserção. É produzido com pescoço (c) pouco divergente. A conexão Cone Morse deste implante favorece sua utilização para elementos unitários. No eixo longitudinal da parte superior do implante existe uma rosca central (d) que permite a fixação do componente protético por um parafuso. O design deste implante favorece a distribuição de carga, sendo indicado principalmente para utilização em osso de baixa densidade. É produzido a partir do torneamento de barras de titânio comercialmente puro, atendendo as normas ASTM F-67; e ASTM F136. É oferecido nos diâmetros 3,50mm; 4,00mm, 4,5mm e 5,0mm; e nos comprimentos 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm.

### 1.5.3 Especificações e Características Técnicas:

O IMPLANTE UN II CONE MORSE vem acondicionado dentro de uma cápsula que é inserida dentro de um blister selado com Tyvek. O blister é colocado dentro de uma caixa de papel acartonado. É oferecido nos diâmetros 3,50mm; 4,00mm, 4,5mm e 5,0mm; e nos comprimentos 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm e 18mm.

## 1.6 - Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação:

O princípio de funcionamento do implante dentário está na biocompatibilidade do material em que é produzido, o que permite a sua integração óssea (maxilar e mandibular), exercendo a função da raiz do dente perdido. A rosca é projetada para distribuir convenientemente a carga mastigatória. A porosidade da superfície exerce retenção óssea, que se distribui homogeneamente na área superficial e atua também na microdistribuição da carga mastigatória. Os recessos apicais atuam após ósseointegração como retenções mecânicas.

O implante é introduzido no osso através de um processo cirúrgico intra-oral, fixado por travamento em osso tipo I, II, III ou IV. Os implantes IMPLACIL foram projetados para restaurações unitárias, múltiplas, totais e também para o sistema de Carga Imediata.

## 1.7 - Partes e acessórios acompanhantes:

Lista de itens contidos dentro da embalagem conforme modelo:

Implante UN II Cilíndrico HI, Implante UN II Cilíndrico HE TI, Implante UN II Cônico HI, Implante UN II Cônico HE TI, Implante UN II Cone Morse.

- 01 Implante Universal II
- 01 Tapa Implante
- 01 Instrução de Uso
- 03 Etiquetas de Rastreabilidade
- 01 Montador (OPCIONAL)
- 01 Parafuso do Montador (OPCIONAL)

## 1.8 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio

**Opcionais:** Não aplicável

**Materiais de consumo:** não aplicável

**Materiais de apoio:** Instruções de Uso

**Itens de fabricação para uso exclusivo nos produtos da empresa:**

Todas as partes descritas nesta Instrução de Uso são de uso exclusivo no produto IMPLANTE UNIVERSAL II.

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do usuário.

## 1.9 – Simbologia



Atenção! Consultar as informações fornecidas



Consultar as instruções de uso



Valido até



Data de Fabricação



Fabricante



Método de esterilização por radiação



Lote N°



Não voltar a esterilizar




Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Não reutilizar



## 2 - Instruções para uso do produto

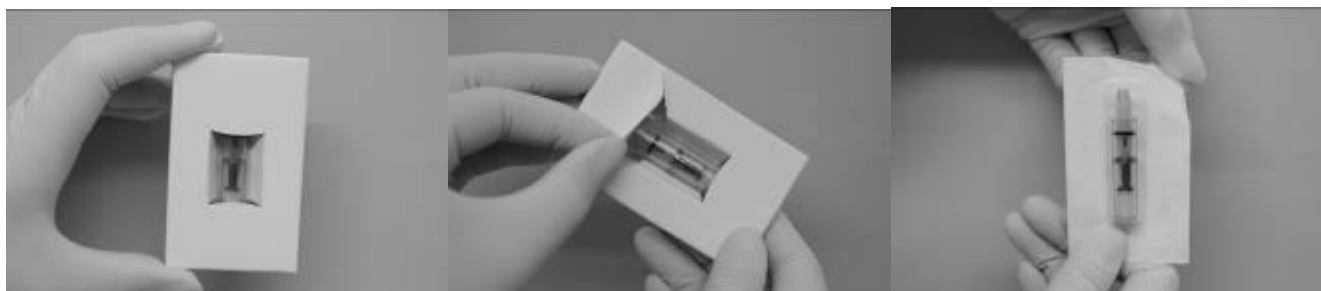


Abra a embalagem externa puxando pelo serrilhado. Abra o blister pela aba lateral e retire a cápsula. **IMPORTANTE:** Não abra a cápsula antes do momento da inserção do implante



Inicie a sequência de fresas para que seja feita a cavidade onde será inserido o implante

O implante pode ser manuseado de 3 formas diferentes, são elas:

### 1- Batoque:

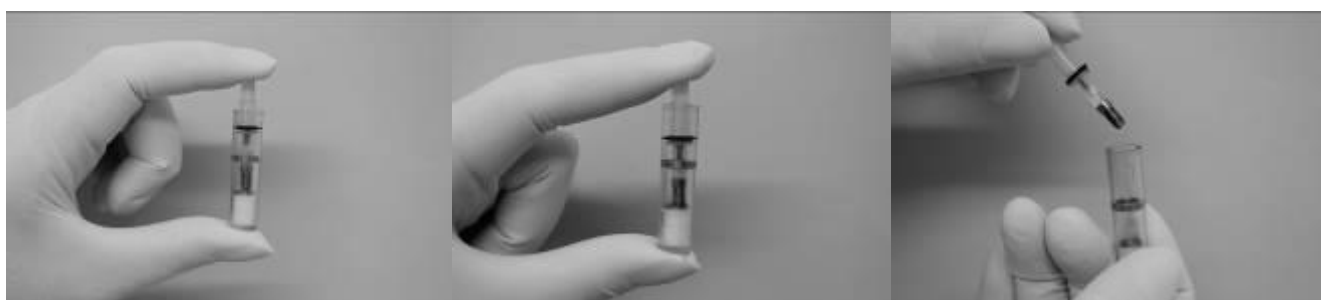

Pressione o batoque até que o hexágono presente na parte inferior e encaixe no implante. Retire o batoque cuidadosamente e com o seu auxílio insira o implante na cavidade recém perfurada. O torque máximo a ser utilizado é de 15N.cm



Finalize a inserção com o auxílio da chave de colocação manual com torque máximo de inserção de 60N.cm ou com a chave de colocação motor com velocidade máxima de inserção de 20RPM.

## 2- Chave Motor




Retire o batoque da cápsula. Encaixe a chave de colocação motor no implante. Retire o implante cuidadosamente da cápsula e insira na cavidade recém perfurada com torque máximo de inserção de 20RPM.

## 3- Chave Manual



Retire o batoque da cápsula. Encaixe a chave de colocação manual no implante. Retire o implante cuidadosamente da cápsula e insira na cavidade recém perfurada com torque máximo de inserção de 60N.cm.

## Tapa Implante

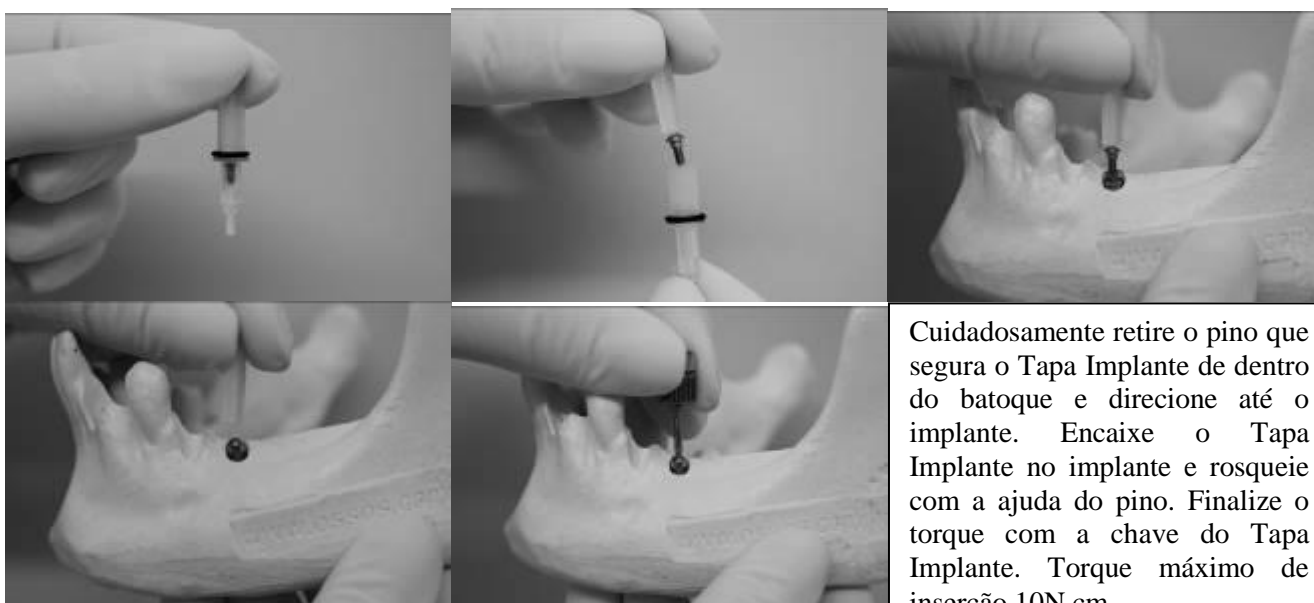

Cuidadosamente retire o pino que segura o Tapa Implante de dentro do batoque e direcione até o implante. Encaixe o Tapa Implante no implante e rosqueie com a ajuda do pino. Finalize o torque com a chave do Tapa Implante. Torque máximo de inserção 10N.cm.

### **3 - Condições especiais de transporte, armazenamento e acondicionamento do produto:**

Armazenamento: Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original.

Transporte: Ao transportar proteja a embalagem da chuva direta.

Acondicionamento: Manter em local protegido de chuva e sol direto.

#### **ATENÇÃO !!!**

Produto de Uso Único. Proibido reprocessar.

Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada.

Produto Estéril. Não reesterilizar. Esterilizado por radiação gama.

Fabricante recomenda o uso único.

### **4 - Advertências e/ou precauções a serem adotadas**

Para o uso seguro e eficaz dos implantes da **Implacil De Bortoli**, sugerimos enfaticamente que ocorra um treinamento específico, uma vez que as técnicas cirúrgicas necessárias para a colocação desses implantes dentários são procedimentos altamente especializados e complexos. A utilização de uma técnica imprópria poderá levar ao fracasso do implante e/ou perda do osso de suporte ou outros efeitos adversos.

Uma triagem rigorosa dos candidatos a implantes deverá ser realizada, incluindo a idade e a presença de hábitos parafuncionais.

A inspeção visual e as radiografias periapicais são essenciais para a determinação dos acidentes anatômicos, das condições de oclusão, do estado periodontal e da adequação do osso.

A radiografia cefalométrica lateral, as tomografias

- Não esterilize, nem use uma segunda vez!

- Não utilize uma embalagem aberta ou danificada.

- O limiar crítico (relação temperatura/tempo) para a necrose do tecido ósseo é a temperatura de 47°C aplicada durante um minuto. A uma temperatura de 50°C durante mais de um minuto, é alcançado o piso crítico de não-regeneração óssea periimplantar.

- A utilização de brocas cortantes, de diâmetro progressivo, com velocidade apropriada (1500 a 2000 RPM/min), associada a uma irrigação abundante, permite evitar a elevação térmica excessiva.

### **5 – Desempenho sobre requisitos essenciais de segurança e eficácia do produto médico, e eventuais efeitos secundários indesejáveis**

#### **5.1 - Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto**

Indicação: Pacientes que necessitam de reabilitação oral total ou parcial.

Finalidade: Exercer a função da raiz do dente perdido

#### **5.2 - Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações**

A cirurgia de instalação do implante deve ser realizada somente por profissionais que possuam capacitação técnica adequada, por se tratar de uma técnica cirúrgica altamente especializada e complexa.

Pode ocorrer perda excessiva do osso ou fratura do implante quando este é carregado além da sua capacidade funcional. Condições fisiológicas e anatômicas podem prejudicar o desempenho dos implantes dentários. Isso deve ser levado em consideração quando forem colocados implantes dentários em pacientes nas seguintes condições: osso de baixa qualidade; higiene oral de baixa qualidade; condições médicas como doenças sangüíneas ou condições hormonais incontroláveis; doenças metabólicas ou sistêmicas que afetem a cicatrização óssea ou de feridas, como diabetes descontrolada e distúrbios de coagulação; tratamentos quimio ou radioterápicos; problemas de oclusão ou articulação não tratáveis; casos de altura ou largura óssea insuficiente; abuso de cigarro e álcool.

Os eventos adversos em potencial associados com o uso de implante dental podem incluir: não integração; perda de integração; deiscência necessitando enxerto ósseo; perfuração do sinus maxilar, borda inferior, face lingual ou canal alveolar inferior; infecção apresentada por: abscesso, fistula, supuração, inflamação ou radiolucência; dor persistente, entorpecimento, parestesia; perda excessiva do osso necessitando de intervenção; e fratura do implante.

### **5.3 - Segurança e eficácia do produto:**

O Implante Universal II é totalmente seguro, desde que as regras de segurança sejam seguidas em todos os procedimentos realizados. O produto foi desenvolvido com material de uso médico, não tóxico, fabricado em titânio ASTM F-67. Quando mantido (armazenado) e conservado conforme mencionado no item 2 desta Instrução de Uso, o produto não perderá ou alterará sua característica física e dimensional. O produto encontra-se estéril e apropriado para uso por até 5 anos contados da data de esterilização.

## **6 – Instalação ou Conexão à Outros Produtos**

O IMPLANTE UNIVERSAL II, para ser implantado necessita ser conectado a uma chave própria após estar integrado recebe a conexão de componentes protéticos para que seja feita a restauração oral do paciente.

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do usuário.

## **7 – Precauções em Caso de Descarte**

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do IMPLANTE UNIVERSAL II, quando o mesmo for inutilizado, este deve ser descartado em local apropriado, ou seja, em local para materiais potencialmente contaminados.

## **8 – Termo de Garantia**

A IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA. Assegura, ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 365 dias, contados da data de aquisição pelo primeiro adquirente.

## **9 – Termo de Responsabilidade**

A empresa IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA., representada por seu responsável técnico Nilton De Bortoli Junior e por seu representante legal Mário Sérgio De Bortoli, abaixo assinados, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações prestadas referente ao produto IMPLANTE UNIVERSAL II, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.

Nilton De Bortoli Junior  
Responsável técnico  
CRO-SP: 32.160

Mário Sérgio De Bortoli  
Responsável Legal